

INSTRUKCJA UŻYCIA TCS CONCENTRATED DENTURE CLEANER



1. Wypłukać dokładnie protezę dentystyczną pod bieżącą wodą przed moczeniem.
2. Opcjonalnie można delikatnie wyszczotkować protezę miękką szczotką do protez.
3. Wymieszać 1 saszetkę w 1 szklance ciepłej wody (raz przygotowany roztwór wystarcza na około 7 dni)
4. Pozostaw roztwór na 3 minuty. Codziennie moczyć protezę przez 30 minut – Bardzo zabrudzone protezy mogą wymagać moczenia przez całą noc.
5. Przed ponownym umieszczeniem w jamie ustnej spłucz dokładnie protezę pod bieżącą wodą